

樣本採集配套包括:

- * 開始之前請先仔細閱讀所有指示
- * 可請您的親友幫助下使用這套工具採集血液樣本
- * 血液樣本可取自身體的任何部位，大多數人喜歡取自手指頭
- * 如有任何查詢，請致電香港代理「生物保健科技(香港)有限公司」(852) 2763 1488



=



1 x 消毒巾



1 x 一次性的
刺針器



3 x 採集條



1 x 醫用膠布



1 x 拉貼袋



2 x 醫用手套



=



訂購表格



客戶信
(HK BioTek Ltd. 副本)




客戶信
(客戶保留副本)



配套指示

1



從拉貼袋中取出採集條，可觸碰採集條的藍色部份，切勿觸碰白色紗部份，然後把採集條放於乾淨的桌面上，白色紗部份向上。

2



雙手在溫暖的清水下沖洗大約一分鐘，然後擦乾。

3



選擇手指頭的邊位作刺點，用消毒巾抹擦這刺點周圍，然後讓它風乾。

4

第五到第七的步序，如果能在親友的幫助下進行，將可達到最佳效果。首先請您的親友把提供的醫用手套帶上，準備幫助您採集血液樣本。

5



先將藍色保護蓋拉開，然後把提供的一次性刺針器對準手指頭，確定整個刺針器底部緊壓在手指頭上。

6



肯定了刺針器緊壓在手指頭後，按下白色的按鈕，啟動刺針器，然後把這已用過的刺針器丟掉。

7




用另外的手指壓著刺點下方，從下往上，讓血點滲出，用消毒巾抹掉第一滴血，然後把消毒巾丟掉。

8



緊壓刺點的周圍，讓血液滴在採集條的白色紗上。為收集足夠的血液樣本作實驗，整片白色紗都應滲滿紅色，然後重複這過程讓血液滴在第二及第三條採集條的白色紗上。

9



拿著收集了血液的採集條，在光線下看著白色紗的後面，若光線能透過白色紗部份，這表示血液沒有完全滲透白色紗，而這樣本將會被拒絕。血液必須完全滲透整個白色紗部份，然後把收集好的採集條白色紗部份向上放到乾淨的桌上，讓它們自然風乾至少45分鐘，最後把三條採集條放回拉貼袋並封好。

10

在拉貼袋上寫好您的姓名，樣本採集日期和客戶編號，連同填好的訂購表格和客戶信(綠色表格)密封後馬上交到香港生物保健科技辦事處，樣本必須在採集後七日內交到香港辦事處。



香港炮台山蜆殼街4號宇宙商業大廈4樓全層
T + 852 2763 1488 F + 852 2763 1433
www.hkbiotech.com